



Cena bez DPH

7.545,00 Kč

Cena s DPH

9.129,45 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Pro začínající a mírně pokročilé studenty
- Lze cvičit práci s přístrojem k určení správného tvaru umělého chrupu
- Snadno použitelný magnetický systém výměny čelistí

Výuka:

- Vynikající odolnost
- Lze cvičit práci s přístrojem k určení správného tvaru umělého chrupu
- Snadné připojení modelů čelistí pomocí magnetů

Přípevnitelné modely čelistí:

- Modely čelistí s magnetickými destičkami a artikulátory FE/D lze připojit k NISSIM Typ 1 tak, jak jsou.

Jak nastavit skus na NISSIM Typ 1?

- Uvolněte ruční šroubek nahoře a sesuňte pohyblivou desku, pak připevněte horní čelist
- Nastavte skus tak, že budete upravovat pozici pohyblivé desky, dokud se magnet nespojí s magnetickými destičkami na modelu dolní čelisti
- Utáhněte ruční šroub