



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

Prestan AED Ultra trenér (sada 4 ks) (čeština / slovenština)
Objednávací kód: **4401.PPAEDUT406**







Cena bez DPH

14.920,00 Kč

Cena s DPH

18.053,20 Kč

Parametry

Typy defibrilátorů a AED

Výukové

Množstevní jednotka


ks

- Detailní popis

Prestan AED UltraTrainer je simulátor plně simulující funkce poloautomatického nebo automatického Automatizovaného Externího Defibrilátoru - AED. Kompletní balení pro okamžité použití obsahuje ochranný kryt aed/tašku, samotný přístroj a předzapojené elektrody.

Plně české navádění záchránce postupem použití AED - hlas namluven česky - možnost přepnutí na slovenštinu (Dokoupitelná verze CZ/EN).

Jednoduché přehrání Software v případě změny Guidelines

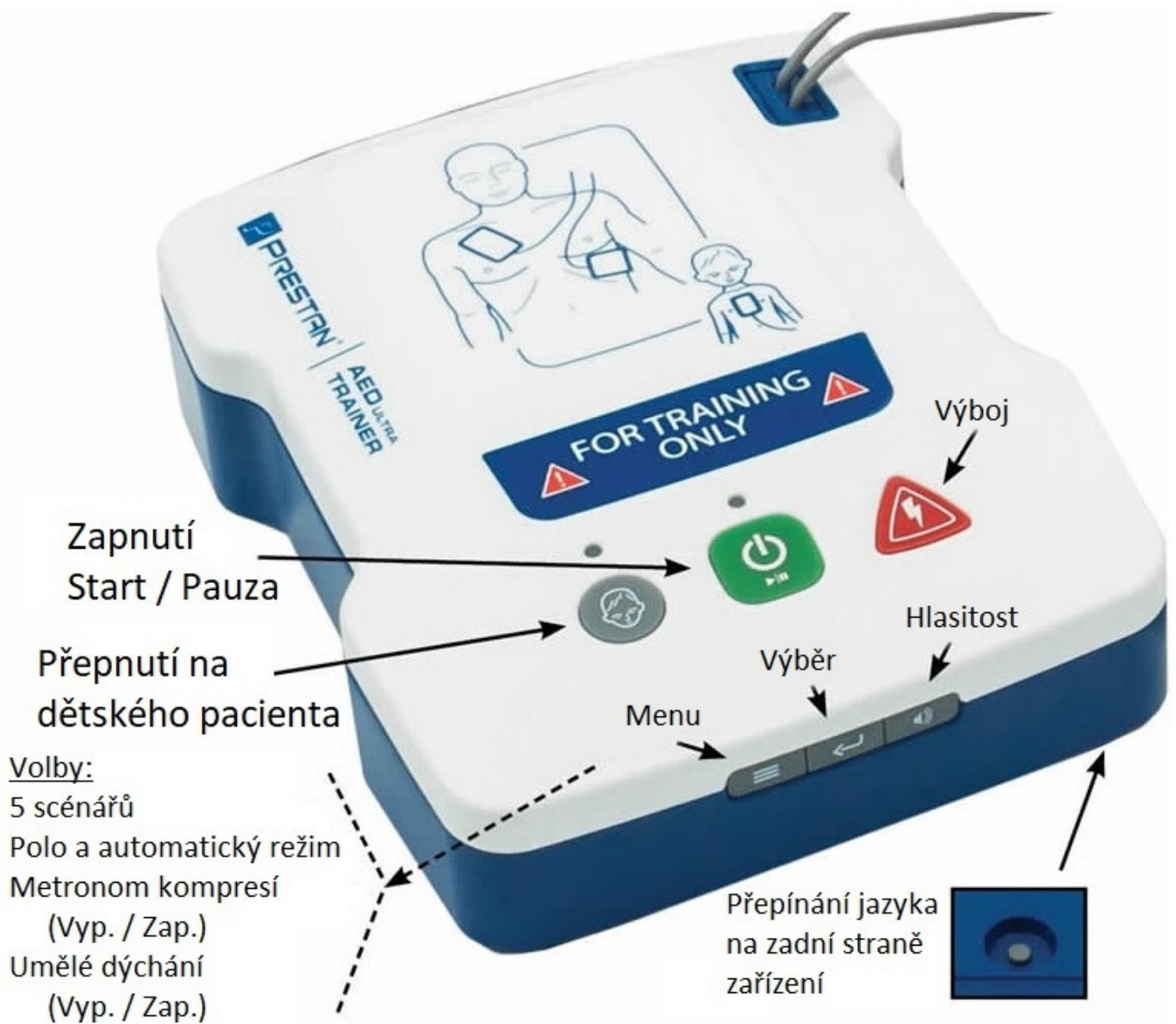

Aktivní elektrody

- Elektrody je nutné před použitím vyjmout z ochranného pouzdra a odlepit z podložky, jako u reálného zařízení.
- Do elektrod nejde žádný elektrický potenciál - simulátor můžete bezpečně použít i na figurantech
- Přístroj automaticky detekuje nalepení elektrod na figuranta nebo resuscitační simulátor. Nejsou nutné žádné další úpravy.
- Automatická detekce nalepení elektrod posune scénář do kroku vyhodnocování rytmu EKG.
- Elektrody jsou univerzální a lze je použít při aplikaci na dospělého tak i na dítě.
- Elektrody jsou odolné, a pokud se lepí na čistý podklad vydrží desítky použití
- Při výměně není nutné měnit i kabel - mění se pouze elektrody

Přepínatelné mody

- Režim dospělý
- Režim dítě - kde je podporována předozadní poloha lepení elektrod.
- Nastavení modu probíhá po zapnutí přístroje jednoduchým stiskem tlačítka

Příprava scénáře

- Jednoduché nastavení scénářů záchrany - pouhým stiskem tlačítka navolíte, kdy se má simulovaný výboj podat a kdy ne - přístroj se pak tímto scénářem řídí.
- 5 možností nastavení scénáře:
 - výboj, výboj, výboj
 - výboj, bez výboje, bez výboje
 - bez výboje, bez výboje, bez výboje

- výboj, bez výboje, výboj
- výboj, výboj, bez výboje
- V závislosti na okolním prostředí lze nastavit různé úrovně hlasitosti řeči simulátoru.
- Možnost nastavení metronomu – zapnuto/vypnuto
- Možnost nastavení hlášení ventilací – 30:2, nebo pouze komprese
- Možnost nastavení automatického podání simulovaného výboje nebo poloautomatického – stisknutím tlačítka pro výboj

Balení obsahuje 4 tyto sady:

- Prestan AED UltraTrainer
- Přenosný obal – taška
- Předzapojené elektrody
- Baterie
- Návod k použití v CZ

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše