

P93B-M - Simulátor pro nácvik mužské katetrizace BASIC

Objednací kód: **4111.102032**



Cena bez DPH

10.450,00 Kč

Cena s DPH

12.644,50 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

S touto katetrizační nácíkovou sadou BASIC lze realisticky demonstrovat, nacvičovat a vyhodnocovat katetrizační postupy mužského močového měchýře. Genitální vložka je umístěna do držáku, který ji drží pomocí magnetů. Materiál genitální vložky je měkký a pružný: s předkožkou lze pohybovat a penis je pružný. Studenti tak mohou nacvičovat všechny kroky nutné k provedení katetrizace (např. dezinfekci). Díky materiálu genitální vložky je pocit při zavádění a vyndávání katétru z měchýře velmi realistický s realistickým odporem a hloubkami zavedení.

Přímá výuka:

Když je katétr správně zaveden, tekutina začne vytékat, jako u reálného pacienta. Katétr lze také kdykoliv sledovat přes průhledný měchýř.

Různé úrovně obtížnosti:

U mužské genitální vložky je možné nastavit tři různé úrovně zúžení močovodu. Při nejužším nastavení není možné provést katetrizaci, což vede k závěru, že je nutné použít suprapubický katétr.

Výhody katetrizačních simulátorů BASIC v několika bodech:

- Mužská katetrizace s realistickým odporem
- 3 úrovně nastavení zúžení močovodu
- Měkká a pohyblivá předkožka
- Výtok tekutiny po správném provedení katetrizace
- Situaci lze pozorovat díky průhlednému měchýři
- Protiskluzové nohy zajišťují stabilitu simulátoru
- Magnetické konektory pro rychlé připojování a odpojování genitálních vložek
- Snadné čištění

Sada obsahuje:

- Stojan s magnetickými konektory pro genitální vložky
- Sada pro mužskou katetrizaci s průhledným močovým měchýřem
- Lahev a trubicové konektory

Poznámka:

Pro katetrizaci doporučujeme použít katétr pouze s jedním nebo dvěma navzájem opačnými sacími očky. Lze použít silikonový i PVC katétr. Doporučujeme následující katétr:

- Zúžení močovodu v poloze „otevřený“ = 16 CH katétr nebo 14 CH balónkový katétr
- Zúžení v poloze „částečné zúžení“ = 14 CH katétr nebo 12 CH balónkový katétr

Nepoužívejte katétr se zahnutou špičkou!

Tip:

Podle směrnic pro správnou katetrizaci, a to i během simulace, by měl být močovod lubrikován lubrikačním gelem (není obsažen v sadě) pro zajištění hladkého zavedení katétru. Lubrikační gel lze také nanést na špičku katétru.