



Cena bez DPH

1.746,00 Kč

Cena s DPH

2.112,66 Kč

#### Parametry

Značka, Výrobce

Dr. Weigert

Balení [l]

5

Množstevní jednotka

ks

- [Detailní popis](#)

#### Hlavní oblasti použití:

Používá se pro neutralizaci zbytků alkalických mycích prostředků během strojního mytí - chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení, kontejnerů, operační obuvi a kojeneckých lahví a jiného zdravotnického vybavení pro kyselá předmytí - laboratorního skla, zvířecích klecí a transportních vozíků

#### Charakteristika:

neodisher ® N může být použit pro neutralizaci zavlčených zbytků alkalických mycích přípravků nebo jako mycí přípravek pro odstranění vodního kamene, močového kamene a jiných zbytků rozpustných v kyselinách. Neobsahuje tenzidy a je velice dobře oplachovatelný. neodisher ® N lze použít na všechny obvyklé předměty laboratorního vybavení vyrobené ze skla, keramických materiálů, nerezové oceli a kyselinám odolných plastů. Neželezné těžké kovy, pochromované a poniklované části stejně jako eloxovaný hliník jsou roztokem neodisher ® N poškozovány. Proto je třeba dát pozor na odolnost oplachovaných předmětů, přístrojů, odtokového potrubí a celého odtokového systému vůči kyselinám. Eternitové a litinové trubky jsou nevhodné.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše