

P93SPC-F - Simulátor pro nácvik ženské katetrizace PRO

Objednací kód: **4111.1023008**



Cena bez DPH

30.230,00 Kč

Cena s DPH

36.578,30 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

P93 PRO, trenažér pro ženskou katetrizaci, lze použít pro realistickou ukázkou, nácvik a vyhodnocení katetrizace močového měchýře u ženy, a to jak přes močovou trubici (transuretrální), tak přes břišní stěnu (suprapubická).

Genitální vložky jsou umístěny v anatomicky přesné spodní části břišního modelu a jsou přichyceny pomocí magnetů. Materiál je měkký a flexibilní: se stydkými pysky lze pohybovat a lze je od sebe oddělit. Takto mohou studenti nacvičovat všechny nutné kroky pro katetrizaci (např. dezinfekci). Materiál dává uživateli při zavádění a vyjímání katétru do měchýře realistický pocit díky realistickému odporu a hloubce zavedení.

Přímá výuka:

Po správném zavedení katétru začne vytékat tekutina, stejně jak tomu je i u reálného pacienta. Katétr lze také pozorovat přes transparentní měchýř. Břišní stěnu verze PRO lze odstranit pro lepší možnost vizualizace postupu během katetrizace močovodu.

Výměna a zavádění suprapubického močového katétru:

Pokud již není možná katetrizace přes močovou trubici, je nutné zavést suprapubický katétr. Suprapubický katétr obvykle lékař zavádí přes břišní stěnu do naplněného močového měchýře a fixuje ho k břišní stěně. Verzi PRO lze použít pro nácvik výměny suprapubického katétru a péče o něho. Nácvik péče zahrnuje výměnu obvazu, čištění katétru a dezinfekci rány.

Přehled všech výhod P93 PRO simulátoru pro ženskou katetrizaci:

- Ženská katetrizace s realistickým odporem
- Měkké a pohyblivé stydké pysky (například pro nácvik dezinfekce)
- Anatomicky realistická struktura pánve
- Výtok tekutiny při správném provedení katetrizace
- Lze pozorovat transparentní měchýř a břišní stěnu lze odejmout
- Nácvik výměny suprapubického katétru a jeho čištění a péče o něj
- Možnost bezpečného postavení na stůl díky protiskluzovým nohám
- Magnetické konektory pro rychlou přípravu a demontáž
- Snadné čištění a údržba, lze kompletně rozložit
- Houba ve vnitřní části předchází tvorbě vlhkosti

Obsah dodávky:

- Realistický model spodní části břicha
- Sada pro ženskou katetrizaci s transparentním měchýřem
- Lahev a trubicové konektory
- Přenosný obal

Poznámka:

Pro katetrizaci doporučujeme použít katétr pouze s jedním nebo dvěma navzájem opačnými sacími očky. Lze použít silikonový i PVC katétr. Doporučujeme následující katétr:

- Zúžení močovodu v poloze „otevřený“ = 16 CH katétr, nebo 14 CH balónkový katétr
- Zúžení v poloze „částečné zúžení“ = 14 CH katétr, nebo 12 CH balónkový katétr

Nesmějí být používány katétrů se zahnutou špičkou!

Tip:

Podle předpisů pro správnou katetrizaci, a to i během simulace, by měl být do močovodu zaveden lubrikační gel (není obsažen v sadě) pro zajištění bezproblémového zavedení katétru. Jako alternativu můžete lubrikační gel nanést na špičku katétru.